



ALKALMAZÁSI KÉZIKÖNYV

Ne legyen gondja, ha eltörik a csontja!





Short Arm

SA




Opencast:

- 1.Melegítsük elő az Opencast sütőt 90°C-ra.
- 2.Helyezze be 2 percre a még kemény az eszközt a külső oldalával a melegítő sütő rácsára.
- 3.Sütőből kivéve helyezze fel a kapcsokat, majd kezdje el formázni úgy, hogy a kliensnek ne legyen túl szoros az összezárás után.
- 4.Fedje le fóliával az Opencastot, figyelve arra, hogy kényelmes legyen a viselet. (ne legyen se túl laza, se nagyon szoros).
- 5.Hagyjuk rajta kb 4 percig, míg ki nem hűl.
- 6.Távolítsa el a fóliát.
- 7.Várjon 15 percet, míg teljesen megkeményedik az Opencast.


Felhelyezési útmutatók: CSUKLÓ

Méretük: **Opencast M x S**, Univerzális jobb és bal sablon

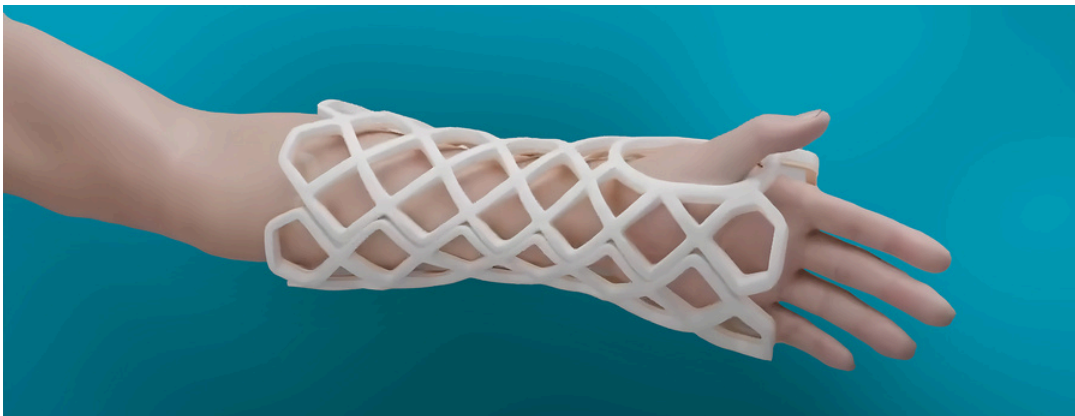

UJJAK, MTC

Méretük: **Opencast M** , Alsó hüvelykujj nyílás, Univerzális jobb és bal sablon
Gyerek kéznél a szűkítéshez cikcakkos vágás javasolt (Isd. kép).

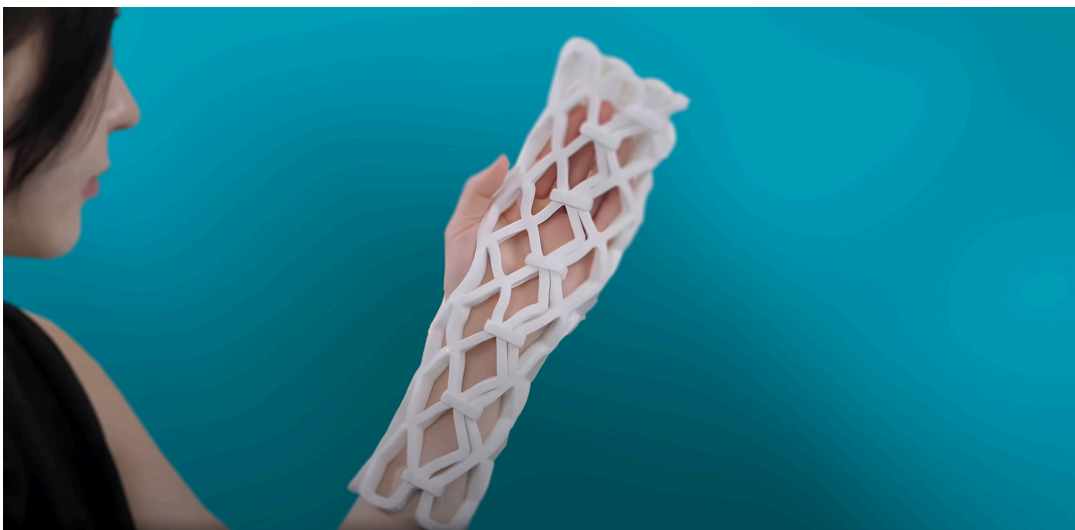

HÜVELYKUJJAK RÖGZÍTÉSE, MTC

Méretetek: **Opencast S x M** , Univerzális jobb és bal sablon




OPENCAST M

1. lépés


Rajzoljon 3 x 3 x 3 rácsnyi kivágást az OPENCASTRA (A hüvelykujj rögzítéséhez nem szükséges a lyukforma). Vágás előtt melegítse fel a sütőt 90°C-ra, majd tegye be a rácsra 2 percre.

A sablon alkalmazható jobb és bal hüvelykujjra is.

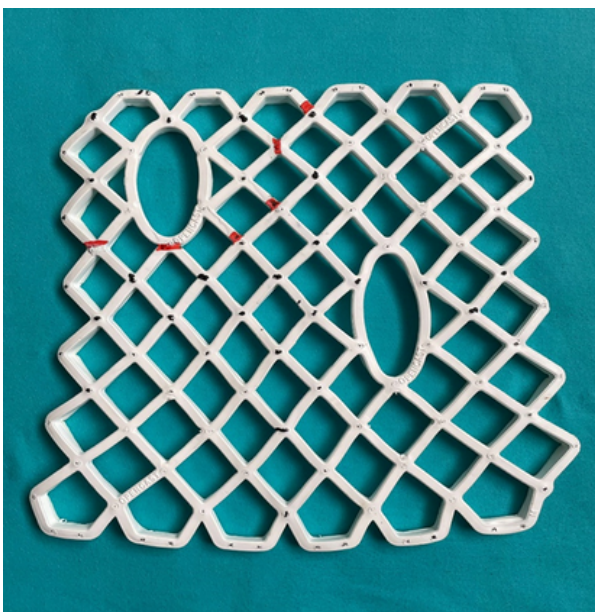


2. lépés: Vágja ki ollóval a még meleg Opencast M sablont

Kihűlt állapotban a méretreszabáshoz csípőfogó javasolt. A fel nem használt sablont ne dobja ki, el lehet tenni a következő alkalomra.

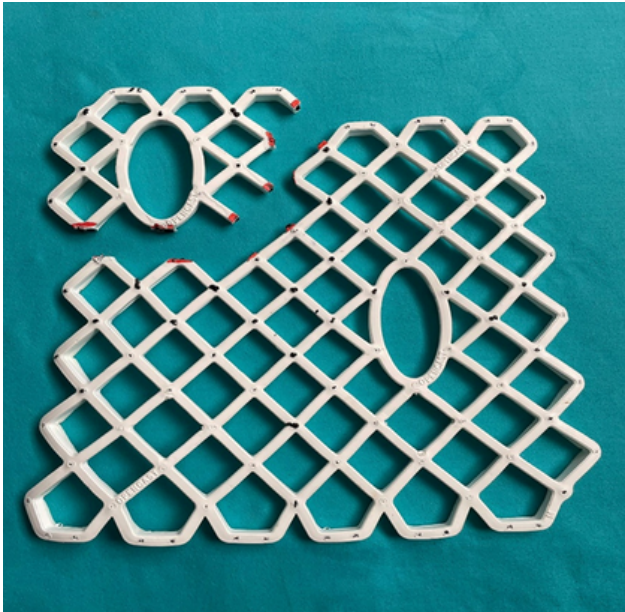


3. lépés :Helyezze fel a kapcsokat


Bal oldalon az OC külső nézete

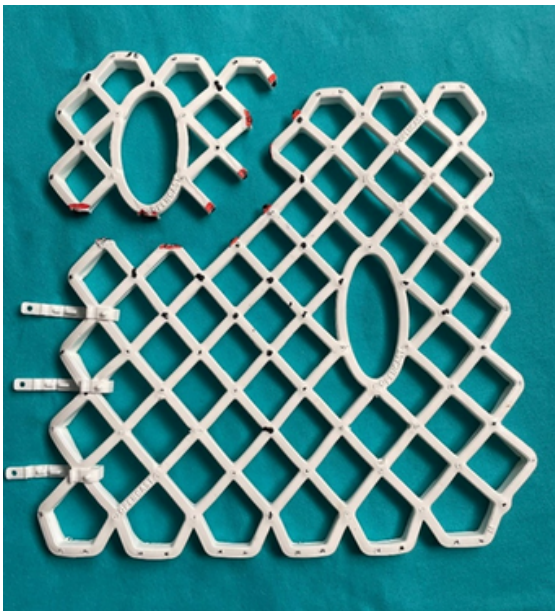

Jobb oldalon az OC belső nézete

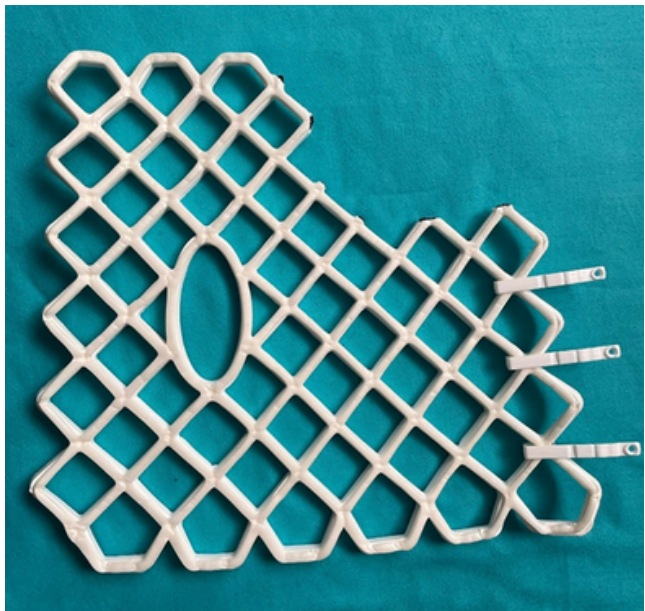

A páciens helyezze el a kezét tenyérrel felfelé az OPENCASTRA. A hüvelykujj tenyértől távol legyen. (Isd. kép)

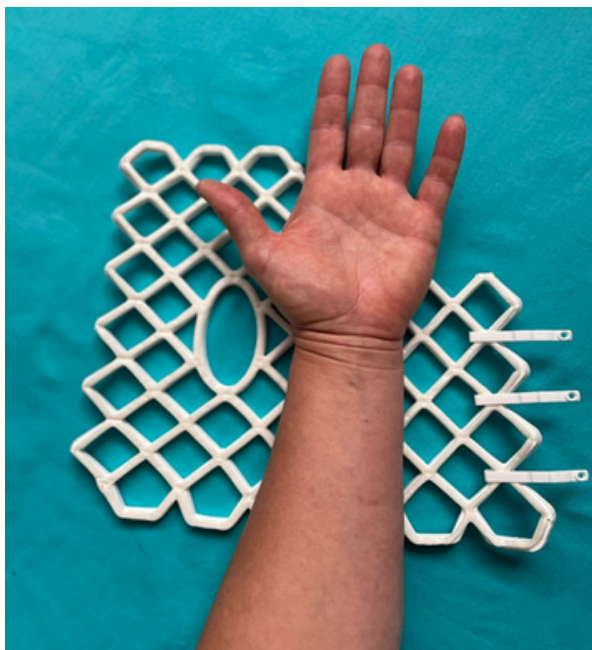

4. lépés: Zárja le a kapcsokat!

Jobb oldali tenyér nézet



Bal oldali tenyér nézet



5. lépés : Tekerje be fóliával az OC-t könyöktől csuklóig

Végezze el a szükséges formázást ügyelve a kényelmes viseletre.

Bal oldali felső nézet



Jobb oldali tenyér nézet



6. lépés A hüvelykujj formázása

Formázás lehet csak fóliával, kapoccsal és fóliával, vagy kábelkötegelővel és fóliával. Az Opencast anyaga kézzel is nagyon jól formázható, hüvelykujjon lévő lyukak lapíthatóak.



7. lépés : Távolítsa el a fóliát.

Fólia eltávolítása után ellenőrizze a végleges formát. Várjon 15 percet, míg megszilárdul az anyag.

Bal oldalon felső nézet




Jobb oldalon tenyér nézet



S (GYEREK) HÜVELYKUJJ SABLON

állítsa be az Opencastot a kívánt szélességre. (Isd. kép,)


A rögzítőt a kívánt formánál nagyobbra vágja, így a formázás könnyebb lesz a végtagra helyezésekor!

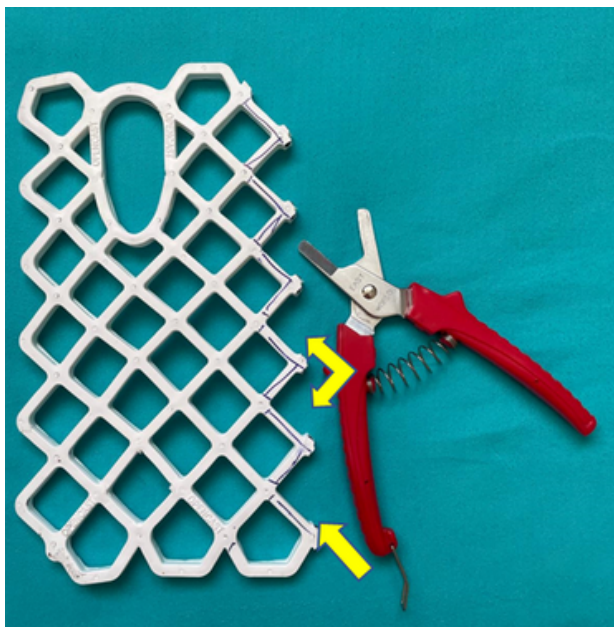

Ne vágjon pontos méretet, nehogy szoros legyen a végtagon az OC!

Kép csak illusztráció, nem sablon!

OPENCAST S külső feléről

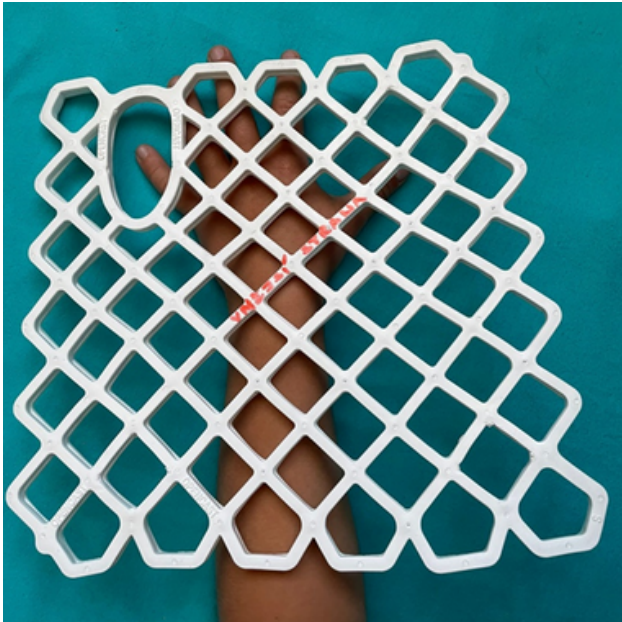


FELHELYEZÉS:

1. lépés:

- Sablon megrajzolása
- Melegítés (90°C / 2 perc)
- Vágás (Meleg OC-t ollóval vágja!)

Külső nézet


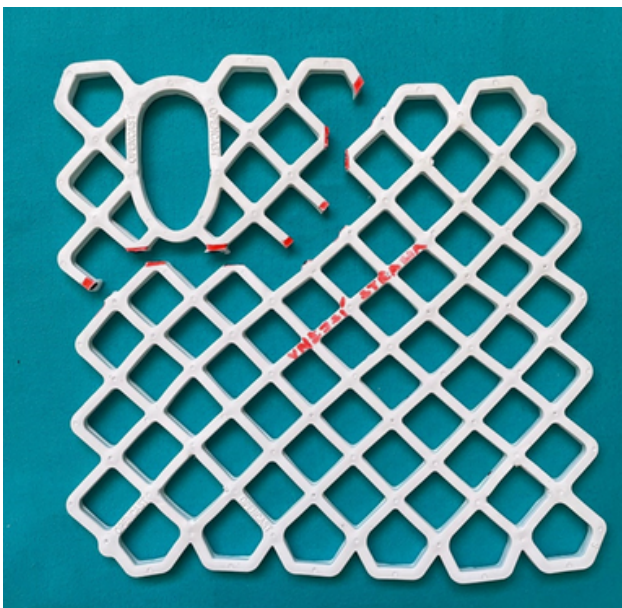


2. lépés


Helyezze rá az OPENCAST ot a kép szerint a végtagra.

3. lépés


Helyezze fel a kapcsokat! A sablont jobb kézre és a bal kézre is fel lehet használni.

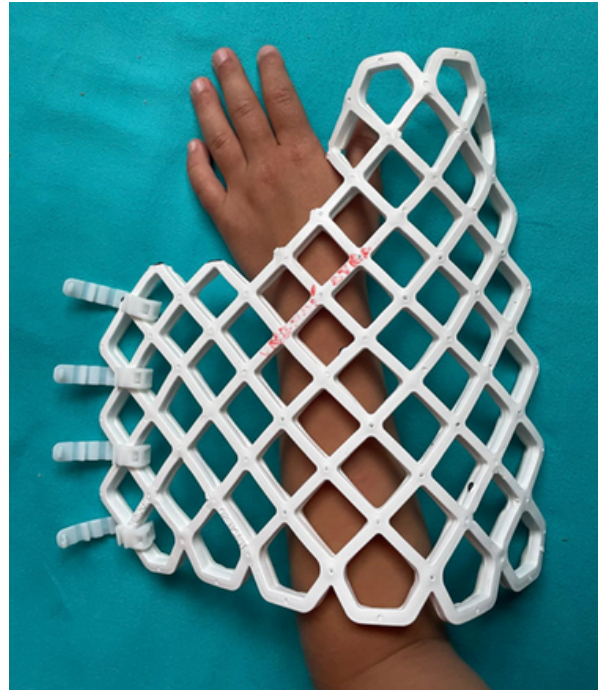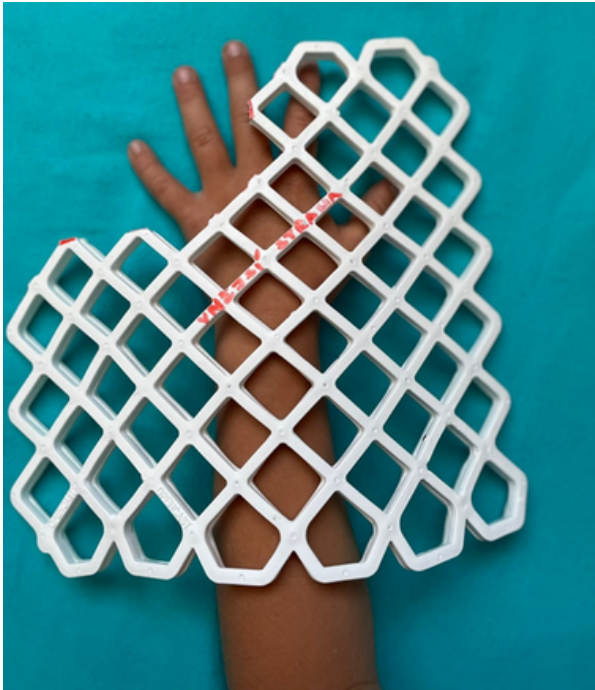

A bal kéz helyzete a sablonban

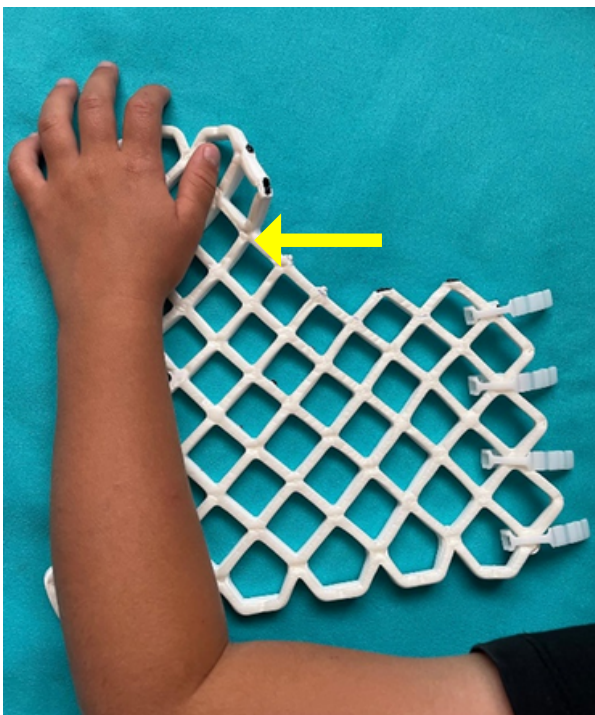


A jobb kéz pozíciója a sablonban

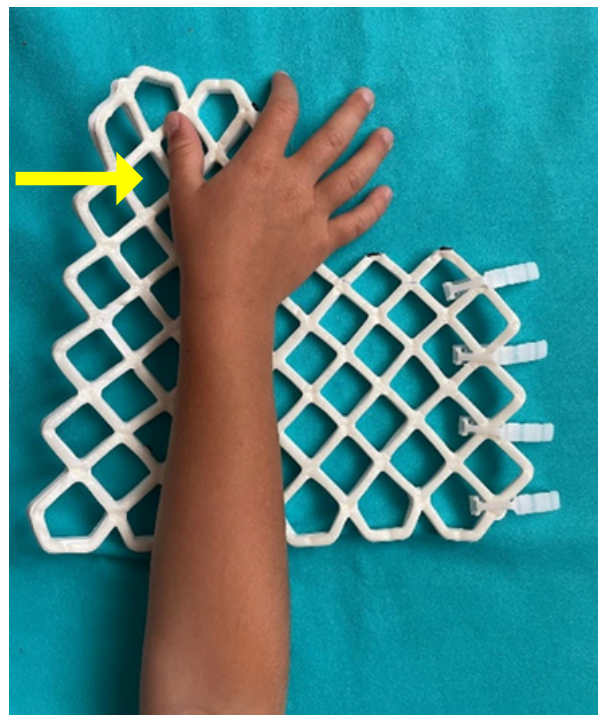

4. lépés - Zárja le a kapcsokat az alkar körül

Vigyázzon az OC helyes felhelyezésére!

Hüvelykujj helyének a kivágása: a rács felső széle az ujjbegynél legyen. Ne lógjon túl feleslegesen!

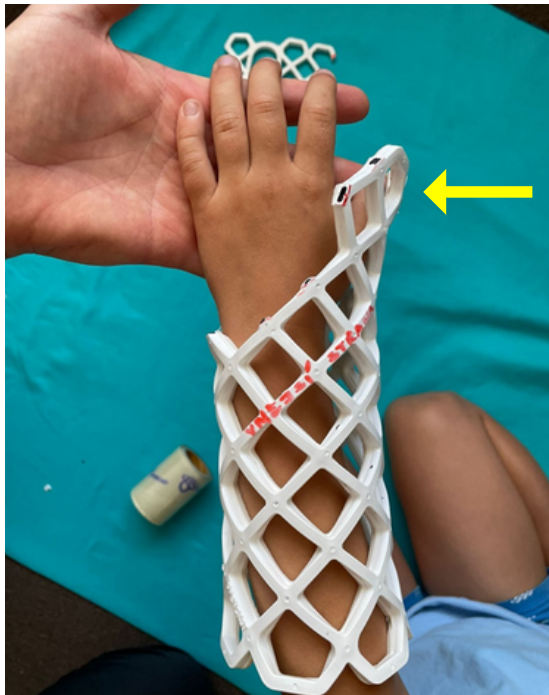


5. lépés: Rögzítő fólia rögzítése

TEKERJE BE CSUKLÓTÓL KÖNYÖKIG A VÉGTAGOT !!!

FIGYELJEN A HÜVELYKUJJ HELYES POZÍCIÓJÁRA!

Utolsó lépés a hüvelykujj formázása, amely a fólia, kábelkötegelővel és kéz segítségével történik. Szükség esetén lehetőség van a szemek egy részének kiegyenesítésére-szorítására, hogy ne lógnak ki. Az Opencast anyaga kézzel is nagyon jól formázható.

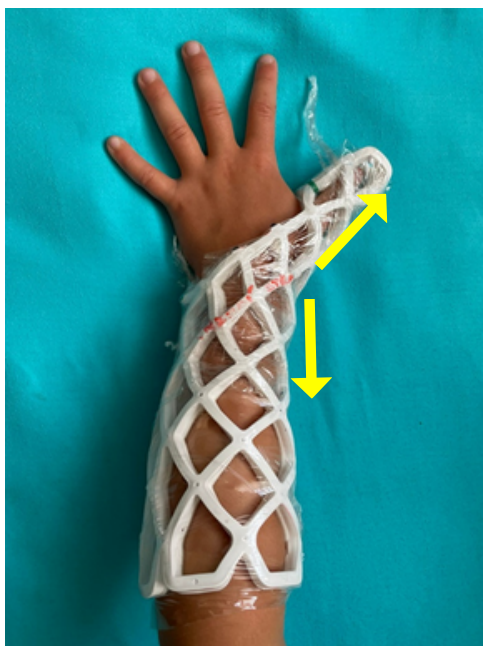

5. lépés

Távolítsa el a fóliát és ellenőrizze az OPENCAST végleges formáját.

(Az illusztrációs képeken egy 4 éves gyermek keze látható.)




Felhelyezési útmutatók: II.-III- MTC HK

Felhasználás: **Opencast M**, Univerzális jobb és bal oldal

A sablon megegyezik a hüvelykujj sablonnal!!! (piros vonal)

A páciens hüvelykujja az alsó nyílásba kerüljön!

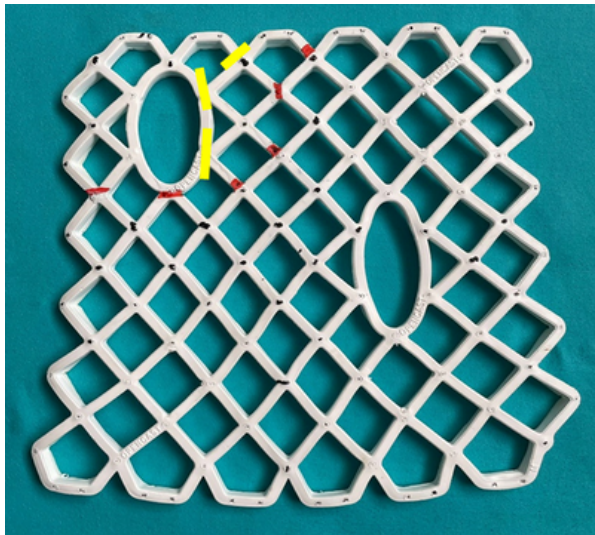

Ha 3 vagy több ujjat kell rögzíteni, akkor szűkebb csíkot kell vágni - lsd a sárga vonalat

Több ujjnál vagy több mint 2MTC rögzítésnél előnyös vágósablont rajzolni az OPENCASTRA. Melegítse fel, helyezze fel, majd vágással alakítsa a beteg kezére.

1.lépés


Mérje meg a beteg kezét, és rajzolja meg a sablont.

Külső nézet.


2. lépés

Vágja ki a sablont és helyezze fel a kapcsokat.

OPENCAST M bal oldali külső nézet

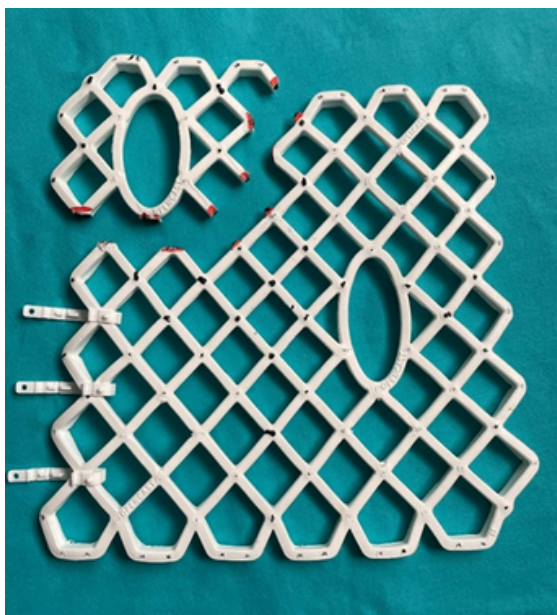


OPENCAST M jobb oldali belső nézet

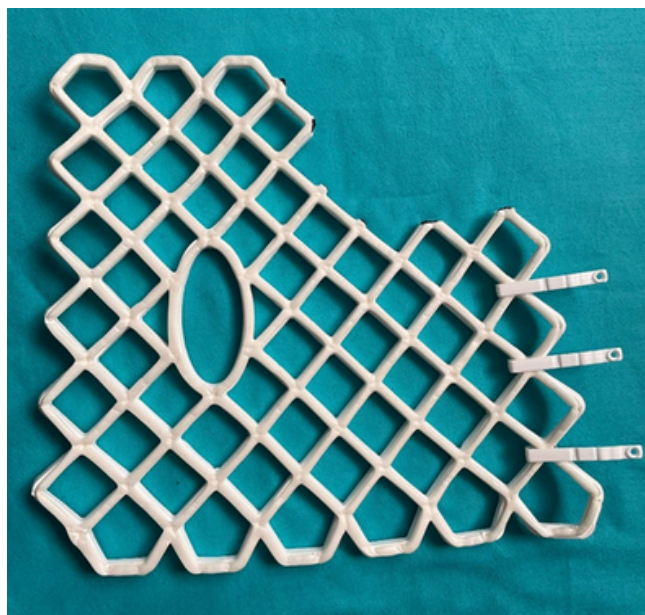


3. lépés

A képen a helyes kéztartás látható OC-ban, (hüvelykujj a lyukban). Kapcsok felrakása után zárás a csukló és az alkar körül.

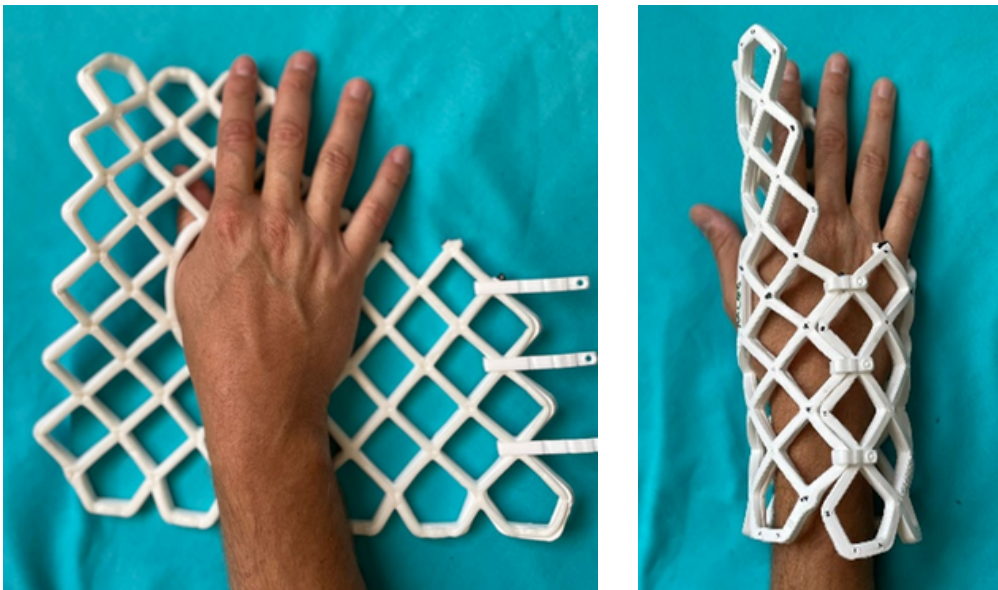


4. lépés

Rögzítjük fóliával az OPENCASTOT alkartól indulva a csukló felé. Az ujjak rögzítésénél használhatunk kábeltötegelőt. Fóliába csomagolva formázzuk a sablont az ujjak körül. Ellenőrizzük, hogy az OC nem szoros. Hagyja rajta 15 percig, míg megkeményedik.

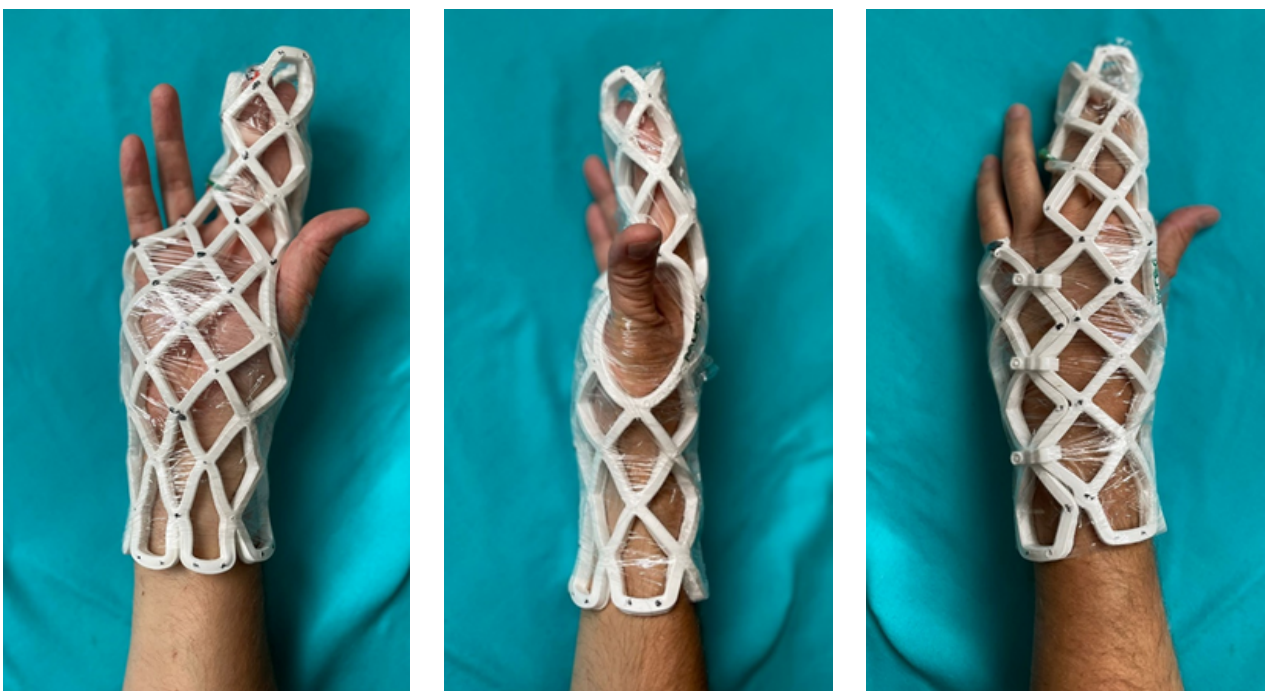

5. lépés

Távolítsa el a fóliát és ellenőrizze az OPENCAST végleges formáját.

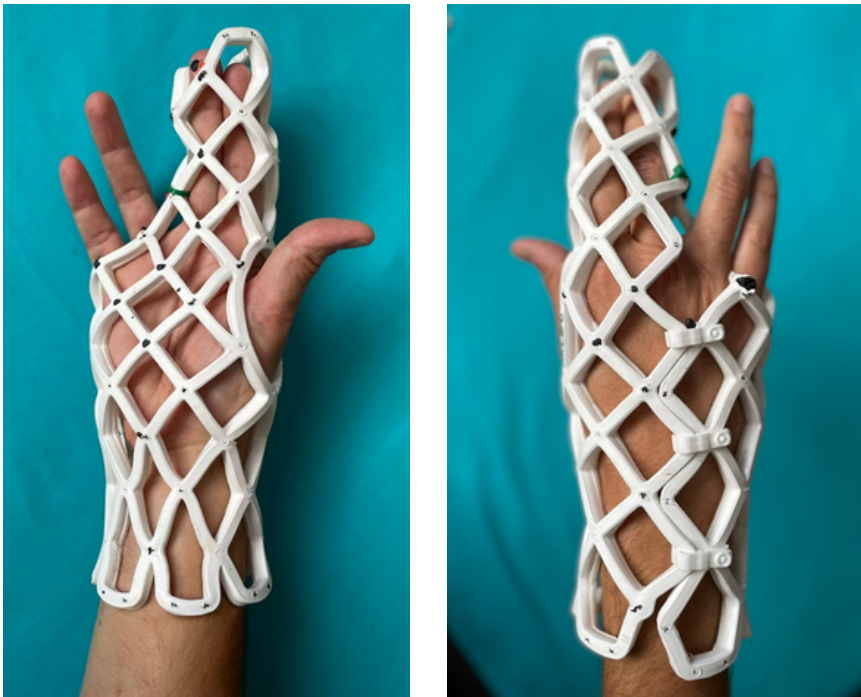



Felhelyezési útmutatók: III-IV. MTC HK

Felhasználás: **Opencast M , S**

Univerzális jobb és bal oldal

1.lépés

Rajzolja meg a kivágandó részt az OC sablon külső felére majd a melegítés után vágja le. (melegen ollóval).

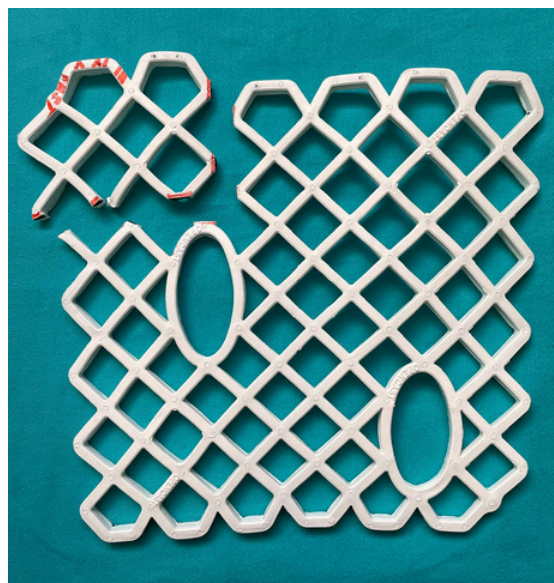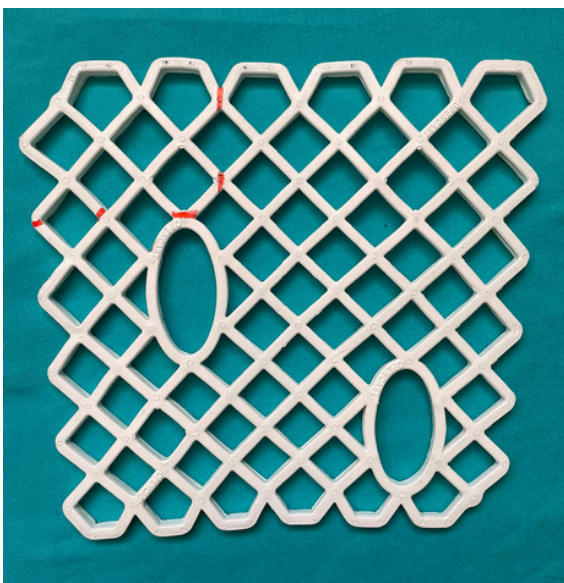


2. lépés

Kéz rögzítésénél vigyázzon az OC helyes felhelyezésére, majd helyezze fel a kapcsokat.

Bal oldali külső nézet



Jobb oldali belső nézet

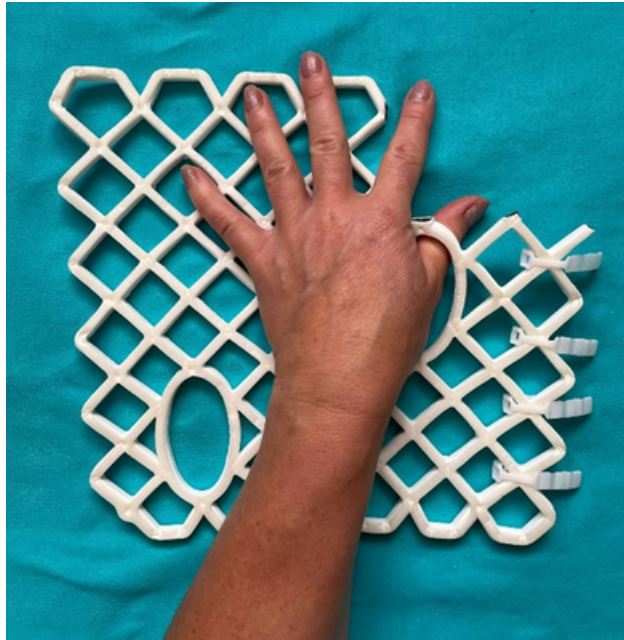

3. lépés

Zárja le a kapcsokat a csukló és az alkar körül.



4. lépés

Az alkartól indulva a csukló felé tekerje be a kezet fóliával. Az ujjak körüli részt rögzítse kábeldötegelővel, majd fóliázás után formázza.



5. lépés

Távolítsa el a fóliát és ellenőrizze az OPENCAST végleges formáját. Ügyeljen rá, hogy ne legyen túl szoros, ne túl laza. A jobb fixáció érdekében rakhat több kábeldötegelőt. Jobb rögzítés érdekében használhat (több) kábeldötegelőt.

